

Саген Д- Лайнер / Sagen D-Liner

Рідкий фотополімерний матеріал

Інструкція по застосуванню

Призначення

Матеріал Саген Д-Лайнер призначений для захисту живих тканин зуба в тих випадках, коли каріозна порожнина знаходиться в межах вітальних дентинних тканин і є небезпека виникнення запальних процесів в післяопераційний період.

Загальні відомості

Всі матеріали Саген зроблено на основі високоякісної сировини з Німеччини та США

Рідкий фотополімерний матеріал Саген Д-Лайнер зроблений на основі Bis-GMA та склоіономерного порошку з великим вмістом іонів фтору. Матеріал Саген Д-Лайнер твердіє під синім світлом в області довжин хвиль 400-500 нм. Матеріал легко аппліцирується точково на дно каріозної порожнини, прозорий, безбарвний. Після встановлення на поверхні каріозної порожнини матеріал на протязі тривалого часу вивільняє йони фтору, що ефективно запобігає виникненню запальних процесів.

Застосування матеріалу Саген Д-Лайнер

У разі прийняття рішення про необхідність встановлення профілактичної прокладки рекомендується використовувати рідкий фотополімерний матеріал Саген Д-Лайнер. Спосіб застосування Саген Д-Лайнер є стандартним для цього класу матеріалів. Головною рекомендацією застосування є нанесення матеріалу на очищену суху поверхню дентину без попереднього травлення або з мінімальним щадним травленням протягом не більше 10с з наступним отвердженням матеріалу протягом 20с. Після цього необхідну ділянку зуба включно поверхню отвердженого матеріалу Саген Д-Лайнер піддають травленню і далі проводять всі необхідні маніпуляції з встановлення пломбувального матеріалу.

Отвердіння

Отвердіння матеріалу Саген Д-Лайнер проводять приладами, генеруючими синє світло в області довжин хвиль 400-500 нм потужністю світлового потоку не менше 900мВт / см2. Час затвердіння складає 20с. **Увага!** Особливу увагу треба приділяти контролю кількості тепла в світловому промені полімеризатора. Якщо промінь буде «гарячим», такий прилад ні в якому разі не можна використовувати на живих тканинах зубів, бо це може призвести до підвищеної чутливості в пацієнта та опіку тканин зуба. Для перевірки потрібно навести промінь на шкіру між великим та вказівним пальцями з зовнішньої сторони долоні. Якщо з'являється біль прилад використовувати не можна.

Зберігання

Термін зберігання матеріалу Саген Д-Лайнер при температурі 2°C - 27°C- 5років. При роботі з ним необхідно після кожної вибірки негайно закрити туб ковпачком. Небажано потрапляння прямих сонячних променів на витягнутий матеріал на будь-якій стадії підготовки до його використання. Це може привести до його передчасного затвердіння. Термін зберігання, вказаний на етикетці співпадає з номером партії.

Форма випуску:

1туб х 1.2мл

1туб х 1.2мл у складі набору матеріалу

Саген Баланс стандартного



UA.TR.137

Сертифікат відповідності:

№ R3M 804 021 B1

ISO 13485; ISO 4049

ТУ У 32.5-25282979-001:2019



Адреса виробництва:

ФОП Подчерняєв О.І.

м.Київ 02160, вул.Каунаська 13

www.sagadent.kiev.ua; fb.com/sagadentkiev

тел.: +38 0965923261